

TheraBond® 3D

Antimicrobial Barrier Systems

Instrucciones de uso

Descripción

Los Sistemas Antimicrobianos TheraBond 3D son absorbentes, apósitos post-operativos que consisten en tela de nylon de plata enchapada 3D.

TheraBond 3D provee una barrera efectiva contra la penetración de bacteria hasta por 14 días. En la presencia de exudación el apósito ayudará a mantener el entorno de la herida húmeda.

Indicaciones

TheraBond 3D está indicado para uso en exudación ligera a moderada espesor de la herida parcial a completa incluyendo heridas traumáticas, heridas quirúrgicas, sitios de donante, quemaduras de primero y segundo grado, así como también úlceras decúbito, úlceras diabéticas y úlceras vasculares.

TheraBond 3D puede utilizarse sobre heridas desbridadas y de grosor parcial.

Precauciones

Contra-indicaciones

No utilice en pacientes con una conocida sensibilidad a la plata.

No use en pacientes durante MRI examen (imagen de resonancia magnética).

Previo al inicio de terapia de radiación remueva TheraBond 3D. Aplique un Sistema de Barrera Antimicrobiana TheraBond 3D nuevo seguido al tratamiento.

Precauciones

Sólo para uso externo

TheraBond 3D no es compatible con productos a base de aceite tales como vaselina.

TheraBond 3D podría no ser compatible con antimicrobianos tópicos.

No utilice TheraBond 3D con soluciones salinas yodine providone.

Evite contacto con electrodos o gelatinas conductivas durante mediciones electrónicas e.g EEG y ECG.

TheraBond 3D no está fabricado para suministrar tratamiento para heridas infectadas.

TheraBond 3D puede utilizarse sobre heridas infectadas que están siendo manejadas de acuerdo a protocolos clínicos institucionales para disminución de la infección como una adición al régimen de tratamiento estándar para suministrar una barrera a la infección bacterial.

Si ocurre enrojecimiento o sensibilización de la piel, descontinúe el uso.

TheraBond 3D sólo debe utilizarse en infantes prematuros (≤ 3 semanas de gestación) cuando el beneficio clínico pesa más que cualquier riesgo potencial para el paciente.

Guía para uso, sistemas aislantes

Limpie la herida con agua estéril

Escoja un Sistema donde el pad cubra la herida completamente.

Remueva el Sistema de la envoltura, utilizando técnica aséptica.

Para aplicar: remueva la mitad del papel de seguridad y coloque el pad de plata in contacto con la herida.

Remueva la segunda mitad del pad de seguridad en forma paralela a la piel.

El apósito debe cambiarse basado en la cantidad de exudación o la condición de la herida.

Nota: el sistema puede adherirse a heridas que están secas o tiene muy poca exudación. Si el sistema no se remueve fácilmente, entonces humedezca o empape para ayudar a remover.

Almacene a temperatura ambiente

PATENTS PENDING

LOT: XXXX

 Sterile unless package
is damaged or open

 Prior to use,
see instructions

Sterile EO

 Latex-Free

 Do Not
Reuse



ChoiceTherapeutics™

190 Industrial Road, Wrentham, MA 02093
Customer Service: 888. 243. 0003